

## Explicación de los símbolos

### Símbolo Indicación



Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directriz sobre Dispositivos Médicos (93/42/EEC).



Fabricante









¡Siga las instrucciones de uso!



Use antes del

SN

Número de serie

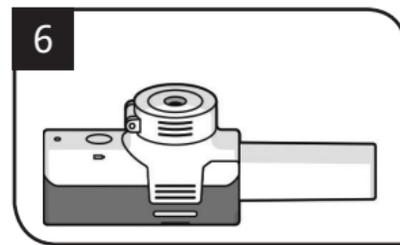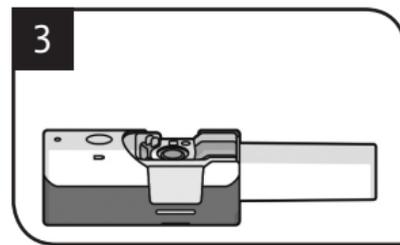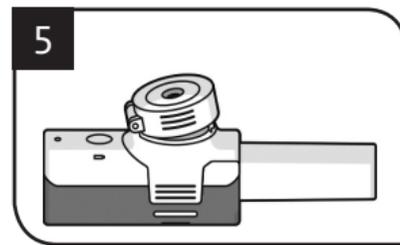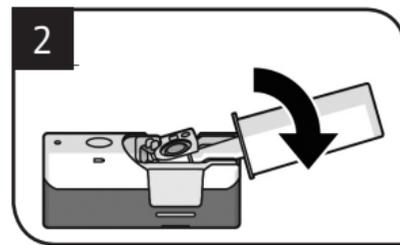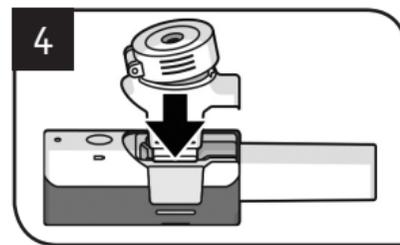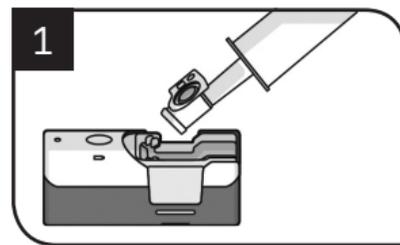

87005917

# Breelib™

## Paquete mensual

### Instrucciones de uso



**Vectura Group plc**  
One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH,  
United Kingdom  
[www.vectura.com](http://www.vectura.com)



**Vectura Ireland Limited**  
The Brickhouse, Block 1, Clanwilliam Court,  
Lower Mount Street, Dublin, D02 CF97, Ireland



08CN0137  
150719



Packaging Technology Berlin gbkop  
client: GVDE  
Reference-Code: 08CN0137  
name: LF-Breelib Monthly Consumables  
colors: Black / Cyan / magenta / yellow  
version: 15.07.2019/01  
page 1  
PZ: 2782A-2  
code-no.:  
IFU date: 150719  
country: LAT/-

Bayer AG  
material-no.: 87005917  
Restricted Document  
dimension: 255 x 85 mm

## 1. Información de seguridad

### Advertencia

- ▶ El paquete mensual Breelib™ es un accesorio para el sistema de inhalación Breelib™. Lea completamente las instrucciones de uso del sistema de inhalación Breelib™ antes de usar el dispositivo. Únicamente puede lograrse una operación correcta y segura si se siguen las instrucciones de uso

del sistema de inhalación Breelib™.

- ▶ No comparta su Breelib™ con otras personas, ya que esto puede conllevar a infecciones. El Breelib™ está diseñado para ser usado por un solo paciente.
- ▶ Asegúrese de que el Breelib™ haya sido limpiado y desinfectado apropiadamente antes de usarlo de acuerdo con las instrucciones de uso del sistema de inhalación Breelib™.

- ▶ Para mantener un desempeño constante, no use los componentes del paquete mensual por más de un mes.
- ▶ No use el Breelib™ si está dañado o fue modificado. Utilice únicamente accesorios suministrados por un proveedor de servicio autorizado.
- ▶ Únicamente Vectura Group plc o un proveedor de servicio autorizado por Vectura Group plc tiene permitido reparar el Breelib™. Vectura Group plc no es responsable

de daño alguno o mal funcionamiento resultante de una reparación no autorizada.

## 2. Contenido del paquete

- ▶ Instrucciones de uso (este documento)
- ▶ Boquilla
- ▶ Unidad Nebulizadora

## 3. Uso pretendido

El paquete mensual Breelib™ es un accesorio para el sistema de inhalación Breelib™. El

paquete mensual Breelib™ puede utilizarse únicamente en combinación con el sistema de inhalación Breelib™. Para más información con respecto al uso pretendido, instrucciones generales y la descripción del dispositivo, consulte las instrucciones para el uso de su sistema de inhalación Breelib™.

## 4. Almacenamiento y transporte

No se definen condiciones de almacenamiento y transporte específicas

para el paquete mensual de Breelib™.

## 5. Vida útil

Los componentes del paquete mensual Breelib™ están diseñados para uso repetido. La vida útil del paquete mensual Breelib™ se limita a un mes.

## 6. Desecho

Los componentes del paquete mensual pueden desecharse junto con la basura doméstica normal.

Fecha de revisión:  
Sep 2017

**Bayer**  
87005917