


Erklärung der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Medizinprodukte-Verordnung (2017/745/EU)
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung befolgen
	Verwendbar bis
	Seriennummer des Gerats
	Medizinprodukt
	Einmalige Produktkennung (UDI)
	Importeur
	Gibt an, dass es sich bei dem Verpackungsmaterial um nicht gewellte Faserplatten (sonstige Pappe) handelt.

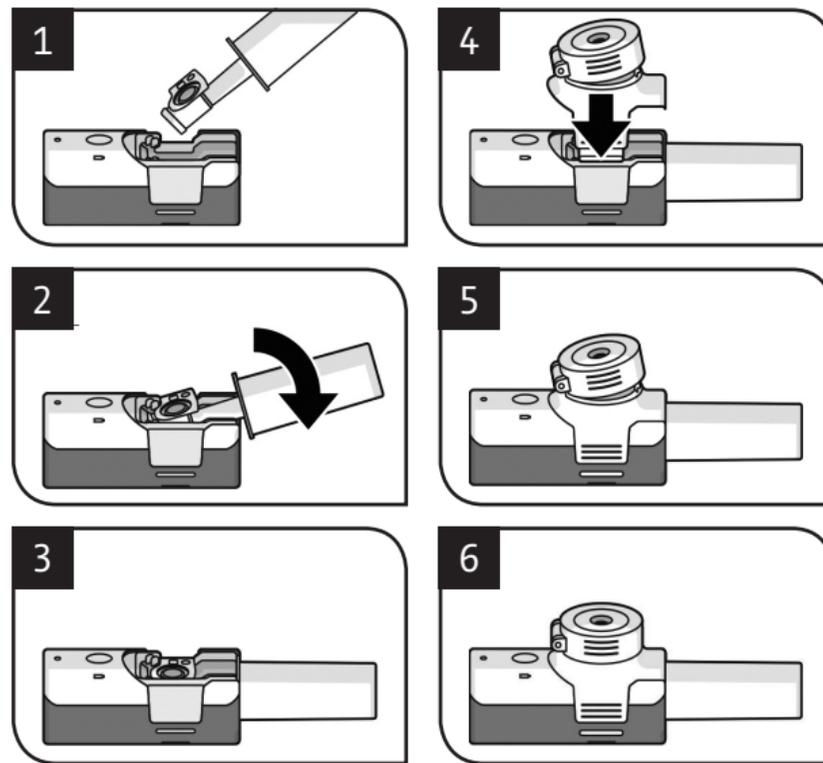

BreeLib™

Monatspackung Gebrauchsanweisung



Vectura Group Ltd
One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH,
Vereinigtes Königreich,
www.vectura.com



Vectura Ireland Limited
Block 2, Newtown Business and Enterprise Centre
Newtownmountkenedy
Co. Wicklow, A63 XV26
Irland



DAW-10005-02
510005R2
270923



1. Sicherheitshinweise

Warnung

- ▶ Die Breelib™ Monatspackung ist ein Zubehör des Breelib™ Inhalationssystems. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung des Breelib™ Inhalationssystems, bevor Sie das Gerät verwenden. Eine korrekte und sichere Funktion ist nur möglich, wenn die Gebrauchsanweisung des Breelib™ Inhalationssystems eingehalten wird.

- ▶ Verwenden Sie den Breelib™ nicht, wenn er beschädigt ist oder verändert wurde. Verwenden Sie nur Zubehör, das von einem befugten Servicepartner geliefert wird.
- ▶ Nur die Vectura Group Ltd oder ein von der Vectura Group Ltd befugter Servicepartner darf den Breelib™ reparieren. Die Vectura Group Ltd haftet für keinerlei Schäden oder Fehlfunktionen, die infolge einer Reparatur durch nicht befugte Personen entstehen.

- ▶ Teilen Sie Ihren Breelib™ nicht mit anderen Personen, da dies zu Infektionen führen kann. Der Breelib™ ist für die Anwendung durch nur einen Patienten vorgesehen.
- ▶ Überzeugen Sie sich, dass der Breelib™ vor der Verwendung ordnungsgemäß gereinigt wurde, wie es in der Gebrauchsanweisung für das Breelib™ Inhalationssystem beschrieben ist.

Achtung

- ▶ Verwenden Sie die Komponenten der Monatspackung nicht länger als einen Monat, um eine konstante Leistung sicherzustellen.

2. Packungsinhalt

- ▶ Gebrauchsanweisung (dieses Dokument)
- ▶ Mundstück
- ▶ Verneblereinheit

3. Vorgesehener Verwendungszweck

Die Breelib™ Monatspackung ist ein Zubehör des Breelib™

Inhalationssystems. Die Breelib™ Monatspackung kann nur zusammen mit dem Breelib™ Inhalationssystem verwendet werden.

Informationen zum vorgesehenen Verwendungszweck, allgemeine Anweisungen und eine Beschreibung des Geräts finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Breelib™ Inhalationssystems.

4. Lagerung und Transport

Für die Breelib™ Monatspackung sind keine spezifischen Lagerungs- und Transportbedingungen festgelegt.

5. Lebensdauer

Die Komponenten der Breelib™ Monatspackung sind wiederverwendbar. Die Lebensdauer der Breelib™ Monatspackung ist auf einen Monat beschränkt.

6. Entsorgung

Die Komponenten der Monatspackung können im üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Bayer
90359996