

## Spiegazione dei simboli

### Simbolo Significato

 Questo apparecchio è conforme ai requisiti della Direttiva sui dispositivi medici (93/42/CEE).

 Fabbricante

 Osservare le istruzioni per l'uso!

 Data di scadenza







 Numero di serie

 Dispositivo Medico

 Identificatore unico del dispositivo

 Importatore

 Indica che il materiale di imballaggio è cartone di fibra non ondulato (cartone)

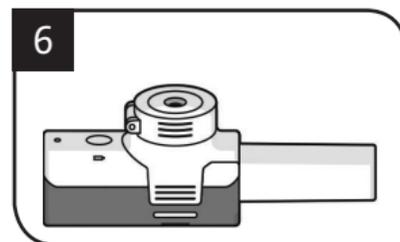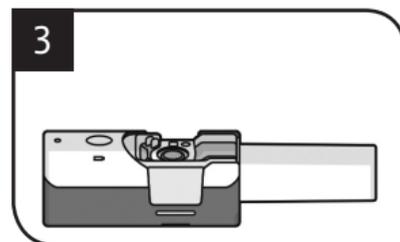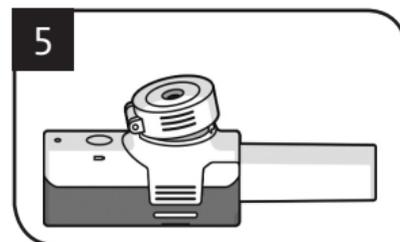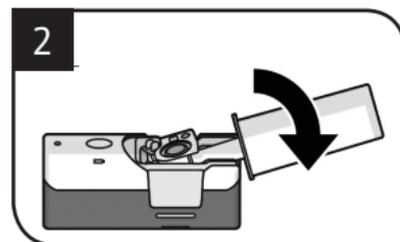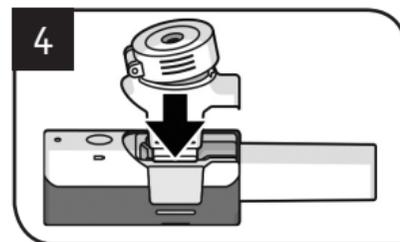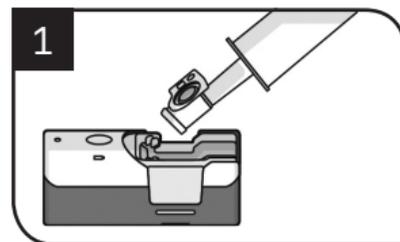

88282213

# Breelib

## Confezione mensile

### Istruzioni per l'uso



**Vectura Group Ltd**

One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH,  
Regno Unito  
[www.vectura.com](http://www.vectura.com)



**Vectura Ireland Limited**

Block 2, Newtown Business and Enterprise Centre  
Newtownmountkenedy  
Co. Wicklow, A63 XV26  
Ireland



 0123



08CN0202  
280422



Packaging Technology Berlin GIIRA page 1  
client: GVDE material-no.: 88282213  
Reference-Code: 08CN0202 PZ: 2782A-2  
name: LF-Breelib Monthly Consumables IFU date: 280422  
colors: Black / CYAN / MAGENTA / YELLOW country: IT//-  
version: 17.06.2022/03 Restricted Document dimension: 255 x 85 mm

## 1. Informazioni relative alla sicurezza

### Avvertenza

- ▶ La Confezione mensile Breelib™ è un accessorio del sistema di inalazione Breelib™. Prima di utilizzare questo dispositivo leggere per intero le istruzioni per l'uso del sistema di inalazione Breelib™. Solo leggendo le istruzioni per l'uso del sistema di inalazione Breelib™ si potrà ottenere un funzionamento corretto e sicuro.

- ▶ Non condividere il proprio Breelib™ con altre persone poiché potrebbero derivarne infezioni. Il Breelib™ è destinato all'uso su un solo paziente.
- ▶ Prima dell'uso, verificare che il Breelib™ sia stato correttamente pulito e disinfettato in conformità con le istruzioni del sistema di inalazione Breelib™.
- ▶ Per garantire prestazioni costanti, non utilizzare i componenti della

- Confezione mensile per oltre un mese.
- ▶ Non usare il Breelib™ se danneggiato o modificato. Utilizzare soltanto accessori forniti da un centro di assistenza autorizzato.
  - ▶ Il Breelib™ può essere riparato esclusivamente da Vectura Group Ltd o da un centro di assistenza autorizzato da Vectura Group Ltd. Vectura Group Ltd non sarà responsabile di nessun danno o malfunzionamento derivante da riparazioni non autorizzate.

## 2. Contenuto della confezione

- ▶ Istruzioni per l'uso (il presente documento)
- ▶ Boccaglio
- ▶ Nebulizzatore

## 3. Destinazione d'uso

La Confezione mensile Breelib™ è un accessorio del sistema di inalazione Breelib™. La Confezione mensile Breelib™ può essere utilizzata esclusivamente con il sistema di inalazione Breelib™. Per informazioni relative all'uso previsto, per istruzioni generali e per la descrizione del dispositivo,

consultare le istruzioni per l'uso del sistema di inalazione

## 4. Conservazione e trasporto

Non sono previste condizioni particolari di conservazione e trasporto della Confezione mensile Breelib™.

## 5. Vita utile

I componenti della Confezione mensile Breelib™ sono destinati ad essere utilizzati più volte. La vita utile della Confezione mensile

Breelib™ è limitata a un mese.

## 6. Smaltimento

I componenti della Confezione mensile possono essere smaltiti come normali rifiuti domestici.

**Bayer**  
882 822 13